

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ГЦИ СИ

Заместитель директора ВНИИОФИ

_____ Н.П. Муравская

«_____» _____ 200_г.

НАБОРЫ СТЕКЛЯННЫХ МЕР ОПТИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ НОСМОП-6-1, НОСМОП-6-2	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № _____ Взамен № _____
---	--

Выпускаются по техническим условиям ТУ 9443-030-11254896-2006

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор НОСМОП-6-1 (далее – набор) предназначен для использования при поверках гемоглобинометров фотометрических портативных АГФ-03/540- «Минигем» («МиниГем 540»).

Набор НОСМОП-6-2 (далее – набор) предназначен для использования при поверках гемоглобинометров фотометрических портативных АГФ-03/523-«Минигем» («МиниГем 523»).

Наборы используются в условиях лаборатории.

ОПИСАНИЕ

Принцип работы с набором стеклянных мер оптической плотности основан на измерении гемоглобинометром оптической плотности мер из набора и определения погрешности измерения гемоглобинометром.

Набор состоит из пяти мер (№№.1, 2, 3, 4, 5), представляющих собой светофильтры диаметром 10 мм из оптических стекол НС8 и К8, и меры К8, представляющая собой светофильтр из оптического стекла К8. Плотность светофильтра определяется толщиной стекол НС8, а толщина стекла К8 дополняет до общей оптической толщины меры - 9 мм. Светофильтры помещены в пластмассовый корпус, имеющий форму параллелепипеда с габаритными размерами, соответствующими габаритным размерам стандартных оптических кювет с поперечным сечением 12,4x12,4 мм.

Все, входящие в набор, меры уложены в футляр.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 8.559-93 ГСОЕИ Государственная поверочная схема для средств измерений оптической плотности материалов в проходящем свете.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип наборы стеклянных мер оптической плотности НОСМОП-6-1, НОСМОП-6-2 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, и метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме ГОСТ 8.559-93.

Изготовитель:

ЗАО НПП «Техномедика»

129281, г. Москва, Староватутинский проезд, дом 5, строение 3

Почтовый адрес 127081, Москва, а/я 1.

Адрес производства 127490, Москва, ул. Декабристов, владение 51.

Тел. (495) 181 45 18, факс 403 86 66.

Директор ЗАО НПП «Техномедика»

Е.Н. Ованесов