


ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ПОДАЧИ ШАРИКОВ В ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЮВЕТЫ.

Инструкция по применению.

Диспенсер ДГВИ.36.300.000 предназначен для внесения металлических шариков ДГВИ.36.000.060 в измерительные кюветы ДГВИ.36.000.050 при проведении измерений на анализаторах показателей гемостаза АПГ2-02, АПГ2-02П, АПГ4-02П (коагулометрах).

Диспенсер состоит из трех частей: корпуса с отсеком для шариков -1, кнопки -2 и сдвижной крышки -3.

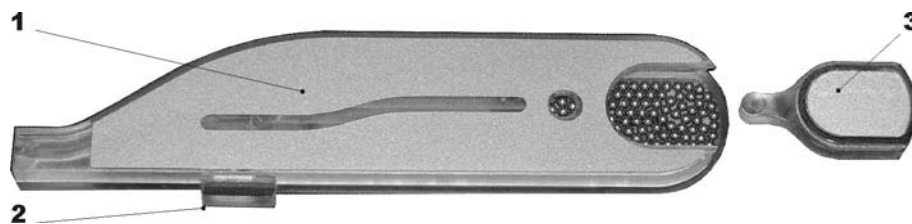

Подготовка к работе.

Перед работой диспенсер необходимо зарядить металлическими шариками (баночка с шариками находится в упаковке с одноразовыми кюветами).

Для этого необходимо:

1. Открыть крышку отсека для шариков путем надавливания на фиксатор крышки и одновременным выдвиганием ее наружу.
2. Заполнить диспенсер шариками. В диспенсер вмещается более 1000 шариков.
3. Закрыть крышку до попадания фиксатора крышки диспенсера в отверстие фиксации.

При заполнении диспенсера шариками устройство держать в наклонном положении, отверстием отсека для шариков вверх.

При зарядке шарики не должны контактировать с посторонними предметами во избежание попадания загрязнений на поверхность шариков.

Порядок работы.

Диспенсер предназначен для поштучного внесения шариков в кюветы перед проведением исследований. Для внесения шарика в кювету наденьте носик диспенсера на вертикально расположенную кювету. Нажмите **до упора** и отпустите кнопку диспенсера. При этом из носика диспенсера в кювету выпадает шарик. Снимите диспенсер с кюветы.

Кнопку диспенсера можно нажимать указательным, средним или большим пальцем в зависимости от удобства (см. рис. ниже).

По окончании работы положите диспенсер на горизонтальную поверхность.

Содержите диспенсер в чистоте, проверяйте отсутствие загрязнений в отсеке для шариков. При наличии загрязнений необходимо промыть диспенсер спиртом и продуть сжатым воздухом.

Повторное использование шариков не допускается.

